

この度はドイツ・エッセンバッハの「スクリボラックス」を
お買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
本品を正しく、安全にお使い頂くために取扱説明書をお読みください。
また、いつでもお読み頂けますよう大切に保管してください。

保証書

商 品 名 スクリボラックス No.1565-12
お買上 年月日 年 月 日
お買上 店名印

お買上げの日より1年間の期間中に製造上、若しくは材料上に起因する不具合が発生した場合には、無償にて修理若しくは交換致します。

但し、不具合の原因がおお客様の不適切な使用、保管上の不注意(落下、水浸等)天災、当社以外での修理、改善などによる場合は、保証期間内といえども有償修理となります。

株式会社 エッセンバッハ光学ジャパン

〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-15-4

E-mail:info@eschenbach-optik.co.jp http://www.eschenbach-optik.co.jp



scribolux

No.1565-12
スクリボラックス

取扱説明書



警告

- LEDライトは光源を絶対に直視しないでください。目を傷めるおそれがあります。
- ルーペのレンズは「天日取りレンズ」になりますので、不適切な使い方や保管の仕方によっては重大な事態を招くおそれがあります。
- 直射日光の下に放置することは絶対に避けてください。また、レンズを通して太陽を見ることも絶対に行わないでください。



注意

- 長い間ご使用にならない時は、電池を取り出しておいてください。液漏れ等による故障が生じる場合があります。
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください。また、種類の違う電池を混ぜて使わないでください。
- 電池のプラスとマイナス方向を正しく入れてください。
- 電池は火中に投じないでください。怪我のもととなることもあります。

電池交換の際の注意



電池を取り出す際は、手で取り出さずに、写真のような先のとがったもので引っ掛けて取り出すことをおすすめします。

使用上の注意




傾斜のあるところでは、電池ボックスの部分を手で押さえてお使い下さい。傾いてバランスを崩すことがあります。また、レンズを持たないで下さい。汚れ、破損の原因になります。

電池ボックス取扱の際の注意


- ◎ 電池ボックスの取り外し、取り付けの際は、必ず本体脚部を押さえながら行って下さい。
- ◎ 手を傷つける恐れがありますので、手袋やハンカチ、布等を使用して下さい。

■電池ボックスの取扱方法

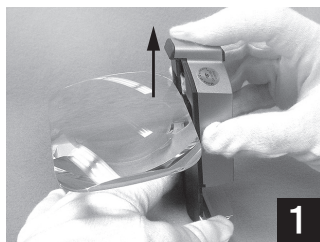


電池ボックスを取り外します。
本体脚部を押さえながら電池
ボックスを上へ滑らせます。

1

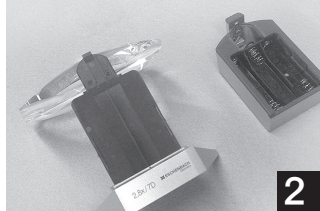

本体と電池ボックスを分離
させます。


2

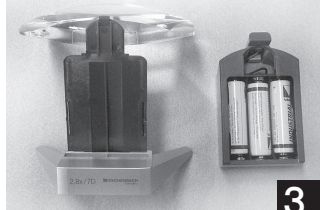

電池ボックスの土表示通りに
電池を入れます。

3

⚠ 電池のプラスとマイナス
方向を正しく入れてください

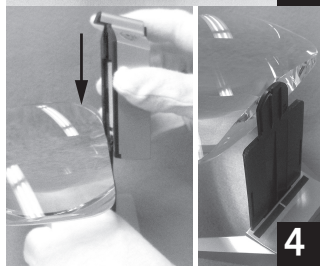

電池ボックスを本体に取り付
けます。
本体と電池ボックスの溝を合
わせ、そのまま下方向にすべ
らせます。
このとき、必ず本体脚部を片
手で押さえてください。

4

■ライトの付け方




スイッチを押すとライトが
つきます。
オートオフ機能
(30分後自動消灯)

■レンズ角度調整用部品



「レンズ角度調整用部品」が本体
に取り付けられていない場合は、
写真のように取り付けてください。

*本体はレンズ角度調整部品な
しで使用することもできます。

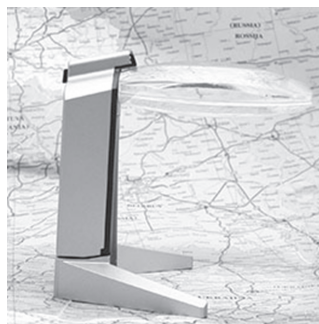

「レンズ角度調整用部品」なし



「レンズ角度調整用部品」あり

||

斜め前方から
レンズを覗き込みやすい