



Design Your Voice

Hakuzo

ハクゾウ 創傷保護用吸収パッド

未滅菌

ラップキュアドレッシング

一般医療機器

HAKUZO WRAP CURE DRESSING

固着しにくいフィルムでサンドした吸収性コットンシートをロール状にした創傷保護用吸収パッドです。



製品特長



1巻入
幅75mm×全長5m

No.75



1巻入
幅150mm×全長5m

No.150

製品コンセプト

ハクゾウラップキュアドレッシングは、適度な湿潤環境を保持し、手軽で簡単に使えることコンセプトにし、現在の創傷被覆材に求められている下記の特長を取り揃えた創傷ケア製品です。

単純化

- ・医療材料の統一化
- ・簡単な医療材料

サイズ

- ・患部にあったサイズの材料
- ・自分で希望のサイズをカットできる


吸収性

- ・湿潤状態を保つ。
- ・過度の浸出液は吸収し正常な皮膚は湿潤状態にしない。

1 固着しにくいフィルム使用

パッドの表面には、患部とくっつきにくいポリエチレンフィルムを使用しています。


構造

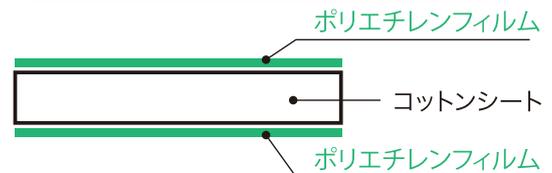

2 湿潤環境

穴あきのポリエチレンフィルムにすることにより、浸出液をコットンシートが吸収し、患部を適度な湿潤状態に保持します。

イメージ図

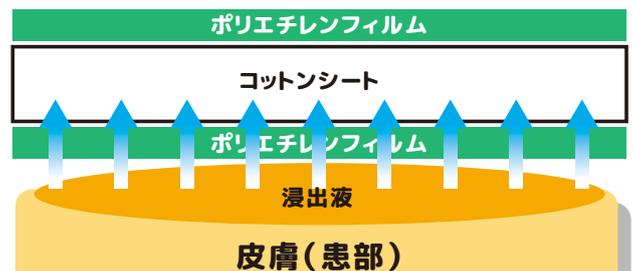


3 自由な長さにカット

ロールタイプのため、患部にあったサイズにカットでき、無駄がなく便利。




箱に定規を印刷しているため、取り出したい長さに測ることができます。(最大8cmまで測ることができます。)

使用方法

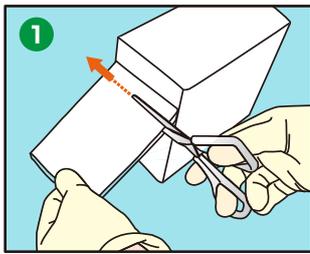

取り出し口のミシン目を破り、ローラーを引き出し、ハサミ等で必要な長さにカットしてください。

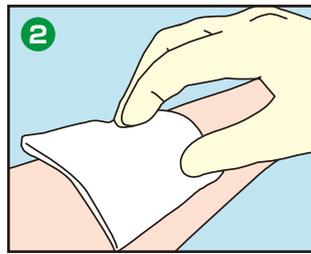

創傷面にパッドを当て、テープ等で固定してください。

適用範囲

◎比較的浸出液の少ない創傷。

※浸出液の多い創傷、感染創には適用できません。

対象施設

◎医療・介護施設

◎在宅 など

2016年10月作成(第1版)

届出番号 25B2X10004000090

医04 整形用品

一般医療機器 医療用不織布 JMDNコード 34655000

ハクゾウラップキュアドレッシング


再使用禁止

【禁忌・禁止】

・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

パッド：脱脂綿の両面にポリエチレンフィルム。

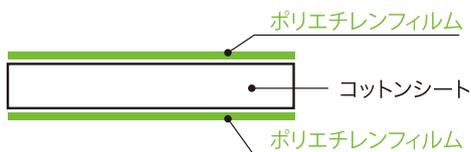

【使用目的又は効果】

創傷面の保護

【使用方法等】

傷口を清潔にして、ロール状のものから必要な寸法を切り取ったパッドを傷口にあてて、絆創膏などで固定する。

【使用上の注意】

・重要な基本的注意

- 1.パッドが汚れたり水にぬれた時は、新しいものに貼りかえること。
- 2.本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
- 3.本品の使用により発疹、発赤、かゆみ等の症状が現れた場合には使用を中止すること。

4.本品は滅菌されていないので、必要に応じて適切な滅菌を行ってから使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1.保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

2.有効期間

本品の容器若しくは被包に記載

【自己認証(自社データ)による(使用期限参照)】

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者

東洋化学株式会社

〒529-1606 滋賀県蒲生郡日野町寺尻1008

TEL 0748-52-5780

・販売業者

ハクゾウメディカル株式会社

大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

<http://www.hakuzo.co.jp/>

TEL 06-6942-0451(代)

添付文書をお求めの場合は下記サイトからダウンロード頂くか、弊社営業までご連絡ください。

<http://www.hakuzo.co.jp/>

品番	規格	サイズ	包装	1箱入数	JANコード
EA765TB-56	 No.75	幅75mm × 全長5m	1巻入	20箱	 4 958286 705019
EA765TB-57	 No.150	幅150mm × 全長5m	1巻入	20箱	 4 958286 705026

※詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634
東京支店 ☎03-3522-6720 広島営業所 ☎082-849-4188
北大阪支店 ☎072-653-4045 四国営業所 ☎0875-52-6900
南大阪支店 ☎0721-20-2900 北九州営業所 ☎093-617-3911
神戸支店 ☎078-976-8901 福岡営業所 ☎092-481-5921
仙台営業所 ☎022-399-7091 熊本営業所 ☎096-345-2253
西東京営業所 ☎042-646-0451 札幌駐在所 ☎011-788-8009
三河営業所 ☎0564-54-5447 盛岡駐在所 ☎019-613-2176
三重営業所 ☎059-350-3844 北陸駐在所 ☎076-225-8013
京都営業所 ☎075-603-4826 沖縄駐在所 ☎098-941-5320
大阪中央営業所 ☎06-6943-6118